

A decorative rectangular border with a wavy, scalloped pattern.

PANSEMENT GO-ON 720

GO-ON est un pansement auto-amalgant de sécurité pour membres inférieurs et supérieurs.

RECTO-VERSO : utilisable des deux côtés.

NE COLLE PAS : facile à appliquer même pour une personne isolée.
Ne colle ni aux plaies, ni aux poils.

AUTO-AMALGAMANT : ne forme qu'un pansement indéchirable, facilitant la coagulation du sang.

ETANCHE : sa trame spéciale empêchant toute infiltration de liquides ou de solides il est possible de continuer à travailler dans l'eau, l'huile, le sable.

ECONOMIQUE : est efficace dans tous les cas de figure.
S'adapte à toute taille ou toute forme.

AUCUNE SUR-EPAISSEUR : contrairement aux pansements et gazes classiques, **GO-ON** permet une utilisation tout à fait normale du doigt pansé.

APPLICATIONS :

USINES : entretien, garage, fabrication,
hygiène et sécurité

**COLLECTIVITES, BATIMENT,
AUTOMOBILE**

**TOUS LES METIERS MINUTIEUX
METIERS DE BOUCHE**



Délai de péremption : 2 ans.

MODE D'EMPLOI : voir ci-contre



PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI :

Prenez ± 20 cm du rouleau et déchirez cette partie sans la couper

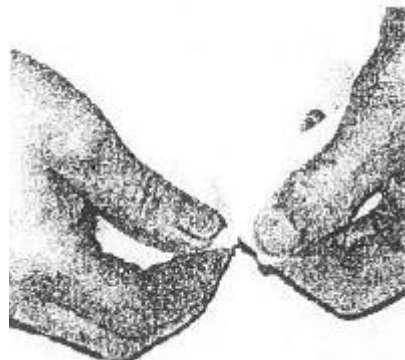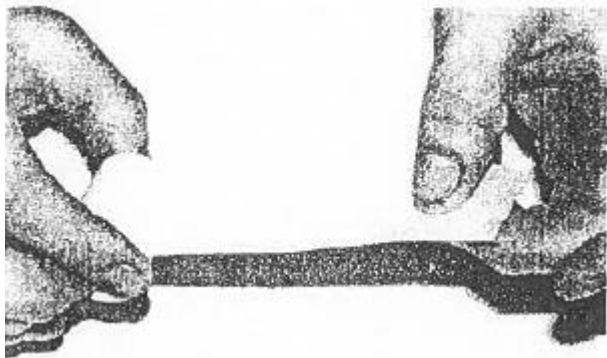

Enlevez les deux parties de protections. Enroulez le bandage autour du doigt blessé. Continuez à envelopper le doigt en spirale.

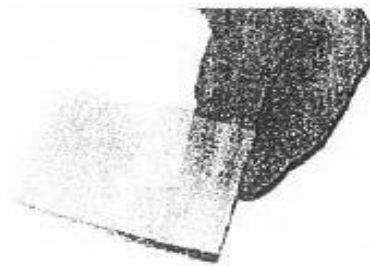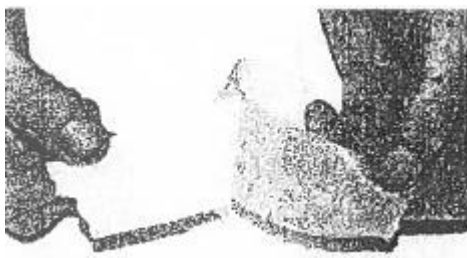

Enroulez la fin du bandage afin de la serrer autour du doigt. Terminez en repliant le bandage au bout du doigt afin d'obtenir un pansement hermétique

